

schülke -+



dentavon® este un dezinfectant fără aldehide pe bază de oxigen activ pentru dezinfectarea amprentelor dentare.

dentavon®

Avantajele noastre:

- spectru de eficacitate bactericidă, levuricidă și virucidă

Domenii de aplicare

Pentru dezinfectarea amprentelor dentare realizate din silicon și polieter.

Instrucțiuni de utilizare

Eficacitatea compusului din soluția de lucru rămâne stabilă pe durata unei zile lucrătoare și, prin urmare, garantează o eficacitate microbiologică deplină în această perioadă. Numai în cazul unei murdării excesive, soluția de lucru trebuie schimbată la intervale mai scurte. Având în vedere aspectele de igienă și pentru a evita transmiterea bacteriilor și a infecțiilor, dezinfectarea amprentelor dentare ar trebui să se facă întotdeauna în cabinetul stomatologic înainte de transferul amprentelor către laboratorul de tehnică dentară. În cazul în care laboratorul de tehnică dentară nu este sigur că amprentele au fost dezinfectate, în toate cazurile trebuie efectuată o dezinfecție a materialului din cabinet.

Dozare și utilizare:

Clățiți amprentele sub jet de apă. Se dizolvă 2 lingurițe dozatoare de produs în 2 litri de apă (= soluție de 2 %). Se pune amprenta în soluție, se lasă să activeze pentru timpul menționat și apoi se clătesc din nou piesele sub jet de apă.

Eficacitate microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
bactericid EN13727, EN14561 - condiții de curățenie	2 % (20 g/l)	15 min.
levuricid EN13624, EN14562 - condiții de curățenie	2 % (20 g/l)	15 min.

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
virucid împotriva virusurilor anvelopate EN14476, EN17111 - condiții de curățenie	2 % (20 g/l)	15 min.
virucid EN14476, EN17111 - condiții de curățenie	2 % (20 g/l)	15 min.

CE 0297

Date despre produs

Compoziție:

100 g de granule conțin următoarele substanțe active: 45 g Pentapotasiu bis (peroximonosulfat)-bis (sulfat).

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.

648/2004: 5 - 15 % agenți tensioactivi anionici, < 5 % agenți tensioactivi neionici, < 5 % săpun, < 5% fosfonați, parfumuri

Date fizico-chimice

Culoare:	Alb
Punct de aprindere:	Nu este cazul
Formă:	granulară
pH:	ca. 4 / 5 g/l / 20 °C / în apă
Vâscozitate, dinamică:	Nu este cazul

Instrucțiuni speciale

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. În timpul dezinfectării amprentelor cu acest produs, trebuie respectate în special concentrația de aplicare prescrisă, precum și timpul de reacție în baia de imersie. A nu se ingera. Evitați contactul cu pielea și ochii. Clătiți părțile corpului afectate cu multă apă. Vă recomandăm să folosiți mănuși atunci când manipulați produsul. Soluția poate acționa ca un înălbitor pe textilele sensibile. Păstrați recipientul bine închis. Protejați de îngheț, căldură și lumina soarelui. A se păstra la temperatura camerei în ambalajul original. Reciclați numai ambalajele complet golite. Resturile de produs pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Asigurați o ventilație adecvată la locul de utilizare. Numai pentru uz profesional. Nu este creat pentru dezinfectia finală a dispozitivelor medicale semicritice și critice.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Cod articol
dentavon® tub (900 g)	4/Cutie	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Informații de mediu

schülke fabrică produse în mod economic și cu ajutorul unor procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, menținând în același timp standardele noastre înalte de calitate.

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web pentru o prezentare generală a întregii literaturi/rapoarte disponibile despre produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale: Telefonul Departamentului de aplicații: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizație de producător în conformitate cu secțiunea 13 alineatul (1) din Legea germană a medicamentelor și certificate de conformitate GMP pentru medicamente.

Sediul schülke

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert Koch nr. 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro