



Șervețele de curățare și dezinfectare rapide și prietenoase cu materialul, impregnate cu soluție cu conținut scăzut de alcool

mikrozid® universal wipes green line

Avantajele noastre

- Șervețele 100% fără plastic
- Sustenabile și neutre din punct de vedere climatic
- Compatibilitate maximă cu materialele
- Acționează în câteva secunde
- Testate dermatologic

Domenii de aplicare

Produsul este potrivit pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale și a altor suprafețe. Dezinfecția noastră rapidă și versatilă este potrivită și pentru dezinfectarea dispozitivelor de comunicare sensibile. Smartphone-urile și tabletele se numără printre suprafețele cu contact frecvent cu mâinile. Acestea pot fi tratate în siguranță cu mikrozid® universal *green line* fără a deteriora materialele.

Instrucțiuni de utilizare

Ștergeți temeinic suprafața cu cârpa și lăsați soluția de ingrediente active să își facă efectul. Asigurați umezirea completă a suprafețelor. Asigurați-vă că toate murdăriile vizibile au fost îndepărtate înainte de dezinfectare. Tratați numai zone mici. Intervalul de ștergere depinde de temperatura camerei și de structura suprafețelor care urmează să fie dezinfectate. Respectați aspectele de igienă atunci când deschideți ambalajul. Asigurați-vă că capacul este închis după utilizare. În cazul adenovirusului și al

Mycobacterium tuberculosis, suprafața trebuie să fie menținută umedă pe toată durata contactului. Numai pentru uz profesional. Orice incident grav legat de produs trebuie raportat producătorului și autorității competente. Nu este destinat pentru dezinfecția finală a dispozitivelor medicale semicritice și critice!

Produsul poate fi utilizat și fără mănuși, dacă acest lucru este permis de standardele de protecție împotriva infecțiilor și de siguranță la locul de muncă.

Eficacitate microbiologică

| Eficiență | Concentrație | Timp de contact |
|--|-------------------|-----------------|
| bactericid <i>in conformitate cu orientările VAH, cu timpi de contact scurți</i> - condiții de murdărie | gata de utilizare | 2 min. |
| bactericid EN16615 - condiții de curățenie | gata de utilizare | 1 min. |
| bactericid EN13727 - condiții de murdărie | gata de utilizare | 15 sec. |
| tuberculicid EN14348 - condiții de curățenie | gata de utilizare | 5 min. |
| levuricid EN13624 - condiții de murdărie | gata de utilizare | 1 min. |
| levuricid EN16615 - condiții de curățenie | gata de utilizare | 1 min. |
| virucid împotriva virusurilor capsulate EN14476 - condiții de murdărie | gata de utilizare | 15 sec. |
| activitate virucidă cu spectru limitat EN14476 - condiții de murdărie | gata de utilizare | 15 min. |
| Norovirus EN14476 - condiții de curățenie | gata de utilizare | 30 sec. |
| Norovirus EN14476 - condiții de murdărie | gata de utilizare | 60 sec. |
| Polyoma SV40 | gata de utilizare | 15 sec. |
| Rotavirus EN14476 - condiții de curățenie | gata de utilizare | 15 sec. |

mikrozid® universal wipes green line

Date despre produs

Compoziție:

O soluție de 100 g conține următoarele substanțe active: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % p/p)

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004: < 5% Agenți tensioactivi anionic

Instrucțiuni speciale

Utilizați dezinfectanții în condiții de siguranță.

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Produsul este foarte compatibil cu materiale precum metalele și materialele plastice (cu excepția sticlei acrilice și a lacurilor sensibile la alcool). Atunci când utilizați dezinfectanți alcoolici, vă rugăm să respectați protecția împotriva incendiilor și exploziilor în conformitate cu regulamentul asociației profesionale "Lucrările de dezinfecție în domeniul sănătății". A se păstra departe de căldură și de surse de aprindere. Informații suplimentare sunt disponibile la cerere. În cazul unei manipulări adecvate, schülke garantează un termen de valabilitate de o lună de la deschiderea ambalajului.

Sunt disponibile următoarele dimensiuni:

- mikrozid® universal wipes *green line* (6 x 114 șervețele 18 x 20 cm)

Informații pentru comandă

| Articol | Forma de livrare | Nr. articol |
|---|------------------|-------------|
| mikrozid® universal wipes green line Softpack (114) | 6/cutie | la cerere |

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

Informații despre mediu

schülke fabrică produse în mod economic și cu ajutorul unor procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, menținând în același timp standardele noastre înalte de calitate.

Informații de specialitate

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web pentru o prezentare generală a întregii literaturi/rapoarte disponibile despre produs: www.schuelke.com. Pentru întrebări individuale:

Telefonul Departamentului de aplicații: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



EMAS
GERÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-00003



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizație de producător în conformitate cu secțiunea 13 alineatul (1) din Legea germană a medicamentelor și certificate de conformitate GMP pentru medicamente.

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro