

schülke -†



Șervețele sporicide, pe bază de acid peracetic, pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale și a suprafețelor

mikrozid® PAA wipes

Avantajele noastre

- eficacitate sporicidă
- gata de utilizare – nu este necesară activarea

Domeniile de utilizare

Produsul este adecvat pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale și a altor suprafețe. Cu puterea unică de oxidare a acidului peracetic, produsul oferă activitate sporicidă în cazul unui focar. Șervețelele mikrozid® PAA sunt șervețelele pentru dezinfectare, ideale în zonele cu un risc deosebit de mare de transmitere a agenților patogeni datorită spectrului larg de eficacitate și rapidității efectului acestora. Exemplele includ sălile de izolare, sălile de operație, unitățile de terapie intensivă și partea nesterilă a secțiilor centrale de servicii sterile CSSD, respectiv secțiile de endoscopie sau neonatologie. Șervețelele sunt adecvate pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale și a altor suprafețe de toate tipurile. Destinațiile principale de utilizare sunt suprafețele aflate în imediata vecinătate a pacienților și suprafețele care intră în contact frecvent cu mâinile sau cu pielea.

Șervețelele pot fi utilizate pentru reprelucrarea dispozitivelor medicale semicritice A și critice A, atâta timp cât manualele de reprelucrare ale producătorilor permit o dezinfectare prin ștergere.

După dezinfecție, dispozitivele critice A și semicritice A trebuie șterse din nou. Nu este adecvat pentru reprelucrarea dispozitivelor medicale semicritice B și critice B.

Eficacitate microbiologică

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
bactericidă EN13727, EN16615 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
tuberculocidă EN14348 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 min.
levuricidă EN13624, EN16615 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
fungicidă EN13624 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
activitate virucidă cu spectru limitat EN14476 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
virucidă EN14476 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 min.
Clostridium difficile EN17126 - condiții de curățenie	Gata de utilizare	5 min.

Certificări

- Certificare VAH



mikrozid® PAA wipes

Informații despre produs

Compoziție:

100 g de soluție conține următoarele ingrediente active:
0,06 % acid peracetic; alte ingrediente: peroxid de hidrogen,
acid acetic

Date fizico-chimice

Culoare:	incolor
Densitate:	cca 1,02 g/cm ³ / 20 °C
Punct de aprindere:	> 100 °C
Formă:	lichidă
pH:	cca 2,2/20 °C

Recomandări speciale

Utilizați dezinfectantele în siguranță. Citiți întotdeauna prospectul și informațiile despre produs înaintea utilizării.

Purtarea mănușilor de protecție (de ex., din cauciuc nitrilic) este absolut necesară. A nu se utiliza pe metale neferoase și a nu se amesteca cu alți agenți de curățare.

Mai multe informații sunt disponibile la cerere. Dacă sunt respectate instrucțiunile, schülke garantează o perioadă de valabilitate de 28 de zile după deschiderea pachetului.

Instrucțiuni de utilizare

Ștergeți bine suprafața cu șervețelul și așteptați până când își face efectul soluția cu ingredient activ. Asigurați umectarea completă a suprafețelor. Asigurați-vă că toate urmele vizibile de murdărie au fost îndepărtate înainte de dezinfectare. Tratați numai suprafețe mici. Suprafața de ștergere depinde de temperatura camerei și de structura suprafeței care urmează să fie dezinfectată. Acordați atenție aspectelor de igienă atunci când deschideți pachetul și scoateți primul șervețel. Asigurați-vă că ați închis capacul după utilizare. Dacă este necesar, utilizați mai multe șervețele pentru aplicarea pe suprafețe mai mari. Asigurați-vă că ați închis capacul după utilizare. Orice incidente grave legate de produs trebuie raportate producătorului și autorității competente. Destinat exclusiv utilizării profesionale. Orice incidente grave legate de produs trebuie raportate producătorului și autorității competente.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Nr. articol
mikrozid® PAA wipes (50 de șervețele)	10/cutie	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

Accesorii pentru utilizare

Accesorii pentru utilizare	Nr. articol
Suport de perete Jumbo tub	134421



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Produse asemănătoare

- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® sensitive wipes
- mikrozid® universal wipes premium
- Suport de perete Jumbo tub

Informații despre mediu

schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

Părerile experților și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/a rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Telefonul Departamentului aplicații:

+49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro