



Un dezinfectant lichid foarte eficient cu proprietăți de curățare, bazat pe o combinație de QAC și amine. Adecvat pentru dezinfectarea manuală și curățarea instrumentelor chirurgicale și a suprafețelor dispozitivelor medicale.

Dezinfecție
optimă
a instrumentelor

discleen® extra

Avantajul nostru:

- Rapid și fiabil
- Concentrații scăzute ale soluției de lucru
- Compatibilitate excelentă a materialelor
- Utilizabil în prezența pacienților
- Dozare ușoară cu flaconul dozator

Domenii de utilizare:

Adecvat pentru dezinfecția manuală și curățarea instrumentelor, uneltelor și suprafețelor dispozitivelor medicale. Poate fi utilizat și în prezența pacienților (de exemplu, neonatologie, terapie intensivă, anestezie și resuscitare, fizioterapie etc.). Preparatul este compatibil cu multe tipuri de materiale, cum ar fi oțelul inoxidabil, metalele moi și aliajele lor, suprafețele cromate și emailate, gresia, porțelanul, cauciucul și materialele plastice.

Instrucțiuni de utilizare:

Soluția dezinfectantă se prepară prin dizolvarea **discleen® extra** în apă la o temperatură de 20-25 °C. Instrumentele chirurgicale folosite trebuie dezinfectate prin scufundare în soluția preparată. După expirarea timpului de expunere prescris, scoateți instrumentele din soluție și clătiți-le cu apă potabilă. Suprafețele sau dispozitivele medicale pot fi dezinfectate prin ștergerea cu o cârpă îmbibată în soluție. Suprafețele și obiectele vizibil murdare trebuie mai întâi curățate și apoi dezinfectate.

Spectrul de efecte:

Bactericid, virucid (BVDV/Vaccinia), micobactericid, tuberculocid, fungicid

descleen® extra

Compoziție:

100 g descleen® extra conține următoarele substanțe active:

- 35 g Clorură de alchilbenzildimetilamoniu
- 50 g Clorură de didecilmetilamoniu
- 66 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină

Date fizico-chimice

formă	lichid gălbui
miros	caracteristic aminelor sau amoniacului
valoarea pH-ului	cca 8-9 (20 °C)

Instrucțiuni speciale:

Numai pentru piața profesională. Nu se recomandă amestecarea cu alte preparate.

Date logistice:

Denumirea produsului	Ambalare	Buc. în cutie
	Sticlă de 1 l	12
descleen® extra	Canistră de 5 kg	1

Perioada de valabilitate:

24 luni

Tipul de produs:

Dispozitiv medical clasa IIb [CE 1023]

Informații de mediu:

schulke fabrică produse în mod economic și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, menținând în același timp standardele noastre înalte de calitate.

Pentru întrebări și informații individuale:

Serviciul clienți: tel.: +420 558 320 260

e-mail: schulkecz@schulke.com

Manager de produs: tel.: +420 724 806 894

Manager de export: tel.: +420 602 756 789



Informații suplimentare:

Vizitați site-ul nostru web:

www.schulke.cz

Producător:
Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445
735 81 Bohumín, Republica Cehă
tel.: +420 558 320 260, www.schulke.cz



Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376, Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708, E-mail: office@intercoop.ro

www.intercoop.ro