



Dezinfectarea rapidă, fără alcool, a dispozitivelor medicale neinvazive.

## mikrozid® sensitive wipes

### Avantajele noastre

- compatibil cu dispozitivele medicale sensibile la alcool
- compatibil cu dispozitivele medicale sensibile
- gata de utilizare

### Domeniile de utilizare

Produsul este adecvat pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale. Specialistul nostru în suprafețe sensibile impresionează prin compatibilitatea remarcabilă cu materialele.

Materialele sensibile sunt foarte frecvente în spitale, motiv pentru care mikrozid® sensitive combină înalta eficacitate cu o excelentă compatibilitate a materialelor. Chiar și capetele sondelor ecografice\* pot fi dezinfectate cu mikrozid® sensitive liquid.

### Instrucțiuni de utilizare

Ștergeți bine suprafața cu șervețelul și așteptați până când își face efectul soluția cu ingredient activ. Asigurați umectarea completă. Asigurați-vă că toate urmele vizibile de murdărie au fost îndepărtate înainte de dezinfectare. Tratați numai suprafețe mici. Suprafața de ștergere depinde de temperatura camerei și de structura suprafeței care urmează să fie dezinfectată. Acordați atenție aspectelor de igienă atunci când deschideți pachetul și scoateți primul șervețel. Asigurați-vă că ați închis capacul după utilizare. Destinat exclusiv utilizării profesionale. Orice incidente grave legate de produs trebuie raportate producătorului și autorității competente.

Nu este destinat dezinfectării finale a dispozitivelor medicale semicritice și critice!

### Reumplerea cutiei

Întâi dezinfectați-vă mâinile și, apoi, folosiți o pereche de mănuși de protecție noi și un halat. În timpul procesului de umplere, asigurați-vă că mănușile nu sunt contaminate de alte activități. Transferați autocolantul cu data expirării în cutia dozatoare. Deșurubați capacul, introduceți complet punga cu rezervele în cutia dozatoare (dacă este necesar, modelați-o în prealabil pentru a se potrivi) și tăiați marginea pungii. Trageți

primul șervețel de pe rolă, introduceți-l în fanta de ghidare din partea inferioară a capacului și treceți-l prin aceasta. Dezinfectați capacul și înșurubați-l.

Pentru zonele cu risc ridicat, schülke nu recomandă utilizarea pungilor de reumplere.

### Eficacitate microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
<b>bacterică</b> EN13727, EN16615 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
<b>levurică</b> EN13624, EN16615 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
<b>virucidă împotriva virusurilor capsulate</b> EN14476 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
<b>Norovirus</b> EN14476 -condiții curate	Gata de utilizare	15 min.
<b>Polyoma SV40</b> în conformitate cu DVV (Asociația germană pentru combaterea bolilor virale)// Ghidul RKI	Gata de utilizare	1 min.

### Certificări

- Certificare VAH
- Listat de OMS



# mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes

## Date despre produs

### Compoziție:

100 g de soluție conține următoarele ingrediente active:  
0,25 g clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil  
amoniu (ADBAC/BKC (C12-C16)); 0,25 g clorură de  
dicedildimetilamoniu (DDAC), 0,25 g clorură de alchil  
(C12-C14) etilbenzilamoniu (ADEBAC (C12-C14))

### Date fizico-chimice

Culoare:	incolor
Densitate:	cca 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / soluție activă
Punct de aprindere:	nu este aplicabil
Formă:	Soluție apoasă impregnată în material nețesut
pH:	5-8/100 % / 20 °C / soluție activă
Vâscozitate, dinamică:	nu sunt disponibile informații

## Recomandări specifice

**Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.** Adecvarea spectrului de eficacitate a produsului trebuie verificată separat. Următoarele aspecte sunt aplicabile dezinfectanților pentru suprafețe:

„Printre altele, dezinfectanții diferă din punct de vedere al spectrului eficacității acestora împotriva microorganismelor. Acest aspect trebuie avut în vedere atunci când alegeți un preparat adecvat pentru zonele respective.” Vă rugăm să rețineți că sunt cunoscute cazuri de tulpini bacteriene care arată o sensibilitate redusă sau o dezvoltare a toleranței la dezinfectanți.\*\* Printre altele, este posibil ca produsele pe bază de compuși de amoniu cuaternar să nu fie suficient de eficiente în aceste situații. Pentru dezinfectarea suprafețelor din zonele cu risc ridicat (cum ar fi terapie intensivă, hematologie-oncologie, neonatologie sau unități de tratare a arsurilor), schülke recomandă, de exemplu, mikrozid<sup>®</sup> PAA wipes sau mikrozid<sup>®</sup> AF wipes, care, datorită proprietăților lor, acoperă un spectru de eficacitate deosebit de amplu.

Se recomandă purtarea mănușilor de protecție. Mai multe informații sunt disponibile la cerere.

## Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Nr. articol
mikrozid <sup>®</sup> sensitive wipes premium maxi (50)	6/cutie	la cerere
mikrozid <sup>®</sup> sensitive wipes premium (100)	6/cutie	la cerere
mikrozid <sup>®</sup> sensitive wipes premium (50)	12/cutie	la cerere
Rezervă mikrozid <sup>®</sup> sensitive wipes Jumbo (200)	12/cutie	la cerere
mikrozid <sup>®</sup> sensitive wipes (120 de wipes)	10/cutie	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

## Accesorii pentru utilizare

Accesorii pentru utilizare	Cod articol
Suport de perete Jumbo tub	134421

## Produse asemănătoare

- mikrozid<sup>®</sup> AF wipes
- mikrozid<sup>®</sup> PAA wipes
- mikrozid<sup>®</sup> sensitive liquid
- mikrozid<sup>®</sup> universal premium wipes

## Informații despre mediu

schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

## Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/a rapoartelor disponibile pentru produs: [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Pentru întrebări individuale:

Telefonul Departamentului aplicații:

+49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

\*nu este destinat dezinfectării finale

\*\* Recomandări din partea RKI (Institutul de sănătate publică din Germania):  
Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

### Sediul schülke

Schülke & Mayr GmbH  
Str. Robert Koch nr. 2  
22851 Norderstedt, Germania  
Telefon +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



### Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.  
547215 Ernei Nr. 376  
Jud. Mureș, România  
Tel/Fax: 0265-267.708  
E-mail: [office@intercoop.ro](mailto:office@intercoop.ro)  
[www.intercoop.ro](http://www.intercoop.ro)