



Dezinfectant fără aldehide pe bază de oxigen activ pentru dezinfectarea amprentelor dentare

dentavon® ID

Avantajele noastre

- compatibilitate bună cu materialele
- spectru larg de eficacitate (bacterică, levurică și virucidă)
- pe bază de oxigen activ

Domenii de aplicare

Pentru dezinfectarea amprentelor dentare realizate din silicon și polieter, alginat prin imersie.

Instrucțiuni de utilizare

Soluțiile de lucru preparate au o valabilitate de 24 de ore ($\leq 25^\circ\text{C}$) și 4 ore ($\leq 40^\circ\text{C}$), pentru stabilitatea substanței active garantate. Soluția de lucru trebuie schimbată dacă este vizibil contaminată. Având în vedere aspectele de igienă și pentru a evita transmiterea microbilor și a infecțiilor, dezinfectarea amprentelor dentare ar trebui să se facă întotdeauna în cabinetul stomatologic înainte de transferul amprentelor către laboratorul de tehnică dentară. În cazul în care laboratorul de tehnică dentară nu este sigur că amprente au fost dezinfectate, în toate cazurile trebuie efectuată o dezinfecție a materialului din cabinet.

Dozare și utilizare:

Clătiți amprente sub jet de apă. Umpleți recipientul cu apă (max 30°C) adăugați produs și dizolvați. Cantitatea de dozaj este indicată în tabelul de dozare. Cantitatea de produs necesară trebuie cântărită.

Se pune amprenta în soluție, se lasă să acționeze pentru timpul de contact menționat și apoi se clătește din nou sub jet de apă.

Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
bactericid EN13727, EN14561 - condiții de curățenie	1 % (10 ml/l)	5 min.
levuricid EN13624, EN14562 - condiții de curățenie	1 % (10 ml/l)	5 min.
activitate virucidă cu spectru limitat EN14476, EN17111 - condiții de curățenie	1 % (10 ml/l)	5 min.
virucid EN14476, EN17111 - condiții de curățenie	1 % (10 ml/l)	5 min.



- condiții de curățenie

dentavon® ID

Date despre produs:

Compoziție:

100 g de granule conțin: 49,5 g Pentapotasiu bis (peroximonosulfat) -bis (sulfat). Conține: sodiu (1-hidroxi-etilidenă) bifosfonat, dodecil sulfat de sodiu, (+)-acid tartric

Date fizico-chimice

Culoare:	alb
Punct de aprindere:	nu este cazul
Formă:	granulară solidă
pH:	ca. 3.0 / 20 g/l / 20 °C / în apă
Vâscozitate dinamică:	nu este cazul

Instrucțiuni speciale

Utilizați dezinfectanți în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

În timpul dezinfecției amprentelor cu acest produs, trebuie respectate în special concentrația de aplicare prescrisă, precum și timpul de contact în baia de imersie. Trebuie purtate mănuși. Soluția poate acționa ca un înălbitor pe textilele sensibile. Păstrați recipientul bine închis. Protejați de îngheț, căldură și lumina soarelui. A se păstra la temperatura camerei în ambalajul original. Reciclați numai ambalajele complet golite. Resturile de produs pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Asigurați o ventilație adecvată la locul de utilizare. Orice incidente serioase relateate cu produsul trebuie raportate producătorului și autorității competente.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Nr.
dentavon® tub (900 g)	4/ cutie	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala sau distribuitorul nostru local.

Informații de mediu

schülke fabrică produse în mod economic și cu ajutorul unor procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, menținând în același timp standardele noastre înalte de calitate.

Informații de specialitate

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web pentru o prezentare generală a întregii literaturi/rapoarte disponibile despre produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:
Departamentul de aplicații:
Telefon: +49 40 52100-666
E-mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH deține o licență de producție în conformitate cu §13 AMG [Legea privind produsele medicale] alin. 1 și certificate GMP [Buna Practică de Fabricație] pentru produse medicale.

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro